

Pflege und Wartung QUBE Motorhandstück

Spannzange von Zeit zu Zeit, je nach Verschmutzungsgrad, gründlich reinigen und an der Außenseite leicht mit Spezialfett (51/1) einfetten (siehe Spannzangenwechse!).



In regelmäßigen Abständen die Spitze (9180) abschrauben und den vorderen Teil des Handstückes mit einem Pinsel reinigen. Darauf achten, dass das Handstück wie auf dem Bild gehalten wird (Spannzange nach unten), damit der Schmutz nach vorne herausfallen kann.

Da das **QUBE** Motorhandstück weder Kollektoren, noch Kohlen und Lüftungsöffnungen hat, ist keine weitere Wartung erforderlich.

ACHTUNG: - Motorhandstücke nicht für Naßbearbeitung verwenden und keinesfalls mit Druckluft reinigen!
 - niemals die Werkzeugspannung öffnen, solange das Motorhandstück in Betrieb ist!

Spannzangenwechsel

- 1 Spannzange öffnen und Werkzeug entnehmen.
Spitze (9180) (Rechtsgewinde) abschrauben.
- 2 Dichtkappe (9134) abziehen
- 3 Mit Spannzangenschlüssel (4115) in die geöffnete Spannzange einfahren, mit Gabelschlüssel (9188) an der Schlüsselfläche auf der Welle festhalten und Spannzange herausdrehen
- Spannzange hat Rechtsgewinde !
- 4 Spannzange aus der Welle herausziehen, reinigen, außen leicht einfetten und in die Welle einsetzen. Mit Schlüsseln wie unter Punkt 3 beschrieben die Spannzange im Uhrzeigersinn bis Endanschlag einschrauben und nur leicht anziehen. Die Spannzange zieht sich im normalen Arbeitsbetrieb selbst fest. Dichtkappe aufschieben und Handstückspitze aufschrauben.



Bitte beachten:

Die Spannzangenschlüssel Nr. 4115 und 9188 befinden sich in der Unterseite der Handstückablage.

Achtung:

Beim Lösen der Spannzange Motorhandstück mit Spannzange nach unten halten um gelösten Schmutz nach vorne herausfallen zu lassen.

