

Pflege und Wartung QUBE Assist Motorhandstück

Spannzange von Zeit zu Zeit, je nach Verschmutzungsgrad, gründlich reinigen und an der Außenseite leicht mit Spezialfett (51/1) einfetten (siehe Spannzangenwechsel).




In regelmäßigen Abständen die Spitze (9180) abschrauben und den vorderen Teil des Handstückes mit einem Pinsel reinigen. Darauf achten, dass das Handstück wie auf dem Bild gehalten wird (Spannzange nach unten), damit der Schmutz nach vorne herausfallen kann.

Da das **QUBE Assist** Motorhandstück weder Kollektoren, noch Kohlen und Lüftungsöffnungen hat, ist keine weitere Wartung erforderlich.

ACHTUNG: - Motorhandstücke nicht für Naßbearbeitung verwenden und keinesfalls mit Druckluft reinigen!
 - niemals die Werkzeugspannung öffnen, solange das Motorhandstück in Betrieb ist!

Spannzangenwechsel

- 1 Fußpedal für Werkzeugspannung betätigen und während des Spannzangenausbaus betätigt lassen.
- 2 Werkzeug entnehmen, Spitze (9180) (Rechtsgewinde) abschrauben und Dichtkappe vom Handstück abziehen.
- 3 Mit Spannzangenschlüssel (4115) in die geöffnete Spannzange einfahren, mit Gabelschlüssel (9188) an der Schlüsselfläche auf der Welle festhalten und Spannzange ruckartig, ggfs. durch Klopfen auf den Spannzangenschlüssel, herausdrehen
 - Spannzange hat Rechtsgewinde !
- 4 Spannzange aus der Welle herausziehen und Fußpedal lösen. Spannzange reinigen und außen leicht einfetten. Bevor die Spannzange wieder eingebaut werden kann, muss das Fußpedal für Werkzeugspannung betätigt und gehalten werden.
 Die Spannzange beim Wiedereinbau nur leicht festziehen.
 Die Spannzange zieht sich im normalen Arbeitsbetrieb selbst fest.

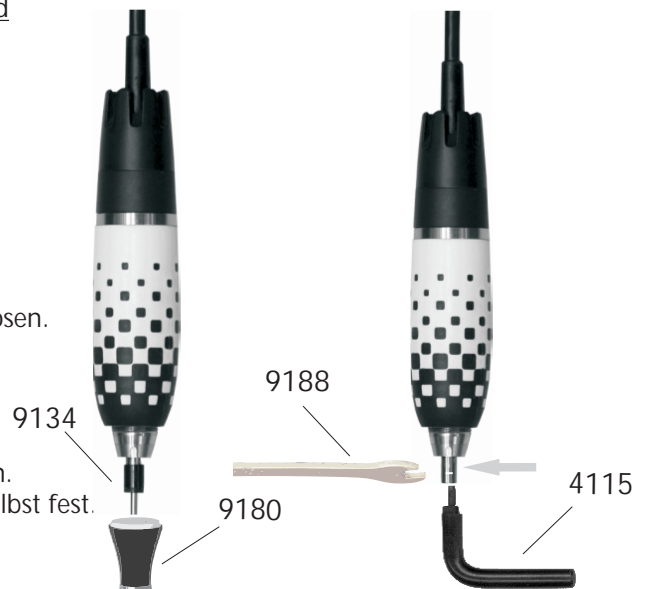

Bitte beachten:

Die Spannzangenschlüssel Nr. 4115 und 9188 befinden sich in der Unterseite der Handstückablage.

Achtung:

Beim Lösen der Spannzange Motorhandstück mit Spannzange nach unten halten um gelösten Schmutz nach vorne herausfallen zu lassen.

