


Programmieranleitung für Signalgeber für Absaugung

Der Signalgeber für Absaugung Art.Nr.: 9060 besitzt ein alternatives Schaltprogramm, welches speziell auf die Absaugung Typ Renfert Silent TS angepasst wurde um einen störungsfreien Automatikbetrieb in Verbindung mit den Schick Mikromotoren zu gewährleisten.

Um das alternative Schaltprogramm 2 für Renfert Silent TS aufzurufen, muss der Signalgeber an eine stromführende Steckdose angeschlossen sein, danach gehen Sie wie folgt vor:

1) Knopf (1) mit spitzem Gegenstand ca. 5 Sek. gedrückt halten, LED im Gehäuseinneren leuchtet kurz, erlischt, leuchtet wieder und bleibt an.

⇒ *Schaltprogramm 1 ist aktiv.*

 **Die LED im Gehäuseinneren ist nur durch die Lüftungsschlitze hindurch sichtbar wie in Abbildung 2 gezeigt!**


2) Knopf (1) ein weiteres mal kurz drücken, LED geht zwei mal aus und wieder an.

⇒ *Das alternative Schaltprogramm 2 ist nun aktiv.*

3) ca. 30 Sek. warten, bis die LED wieder erlischt.


⇒ *Der Signalgeber ist im alternativen Schaltprogramm 2 nun betriebsbereit.*

Abb.1

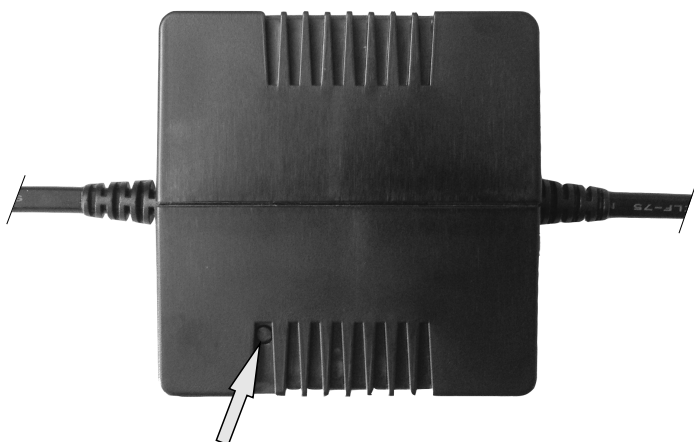

Knopf (1)

Abb.2

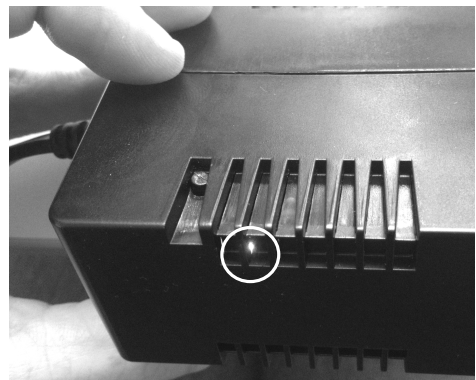

Blickrichtung durch die Lüftungsschlitze zur LED Kontrolle

Um den Signalgeber wieder auf Schaltprogramm 1 umzustellen, wiederholen Sie Schritt 1.

Diese Anleitung ist auch als Videoanleitung verfügbar:

<https://www.schick-dental.de/service-reparatur/reparaturanleitungen1/signalgeber>



Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
E-Mail info@schick-dental.de
Internet www.schick-dental.de

